

Table de dosage Sekusept™ aktiv



100 g poudre = 150 ml

1 cuillère = 20 g poudre = 30 ml

1 doseur = 100 g poudre = 150 ml

| Litre Solution | Concentration de la solution | |
|-------------------|------------------------------|--------|
| | 1% | 2% |
| 2 litres | 30 ml | 60 ml |
| 4 litres | 60 ml | 120 ml |
| 8 litres | 120 ml | 240 ml |
| 10 litres | 150 ml | 300 ml |
| 20 litres | 300 ml | 600 ml |
| 30 litres | 450 ml | 900 ml |

Recommandation d'utilisation :

Verser la quantité de poudre recommandée dans l'eau et mélanger plusieurs fois.

La solution est prête à l'emploi après 15 minutes. La solution active prête à l'emploi doit être changée chaque jour d'application ou même à des intervalles plus courts en cas de fortes salissures.