

# SIMPLE · STABLE · EFFICACE

## JUSQU'À LA DERNIÈRE LINGETTE

### Incidin™ Wipes FlexPack

Distributeur de lingettes hygiéniques jetables pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

L'Incidin™ Wipes FlexPack est, en combinaison avec des désinfectants de surfaces recommandé par Ecolab (p. ex. Incidin™ Pro), l'innovation pour un nettoyage de surface facile et efficace.

#### LES AVANTAGES DE L'INCIDIN™ WIPES FLEXPACK

- ▲ SIMPLE - remplissage et étiquetage facilités
- ▲ STABLE - jusqu'à la dernière lingette
- ▲ EFFICACE - gain de temps, de place et réduction des coûts et déchets



# Incidin™ Wipes FlexPack

Distributeur de lingettes hygiéniques jetables pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

Notre prestation	Votre avantage
Simple	Le distributeur de lingettes se remplit et s'étiquète aisément. La poignée facilite le transport au POC (Point of Care). Un codage couleurs permet le remplissage avec de différents produits ou l'utilisation dans des zones / situations spéciales.
Stable	Durée de vie avec solution préparée jusqu'à 31 jours.
Efficace	Fait gagner du temps grâce à la suppression du transport et du traitement, économise de l'espace de stockage et des coûts grâce à de processus plus efficaces, réduit le volume des déchets.
Kompatibel	Pour une utilisation en combinaison avec les désinfectants Ecolab pour surfaces suivants de la gamme Incidin™ : Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S

## DESCRIPTION PRODUIT


Distributeur de lingettes hygiéniques jetables sous la forme d'un sac de support stable avec poignée. Parois latérales transparentes pour contrôler la consommation. Contient un rouleau de lingettes en tissu PET sec non-tissé non pelucheux de haute qualité (taille du lingettes 20 x 38 cm) à utiliser en combinaison avec les désinfectants choisis Ecolab pour surfaces de la gamme Incidin™ ainsi qu'un bouchon avec étiquettes et label hygiénique en trois couleurs (vert, rouge, bleu).


## BESTELLINFORMATIONEN


Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon bleu	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	3095660
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon vert	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	3095700
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon rouge	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	3095680



Incidin Wipes FlexPack est classé comme un accessoire pour les produits médicaux.

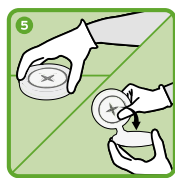
## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


- 


Porter des gants.
- 


Tenir le FlexPack aux endroits marqués à gauche ou à droite du couvercle. Briser le label de sécurité en sens inverse des aiguilles d'une montre en dévissant le couvercle. Poser le couvercle sur le plan de travail avec la face supérieure vers le bas.
- 


Retirer légèrement la première lingette.
- 


Remplir 2,5 L de solution désinfectante Incidin™.
- 

Ouvrir le couvercle.
- 

Veuillez cocher les informations requises sur le couvercle. Les lingettes sont prêtes à l'emploi après un temps d'attente de 30 minutes.
- 

Tenir le FlexPack aux endroits marqués à gauche ou à droite du couvercle. Tourner le couvercle sur le paquet dans le sens des aiguilles d'une montre, commencer le marquage jusqu'à l'enclenchement.
- 

Insérer la première lingette dans l'ouverture du couvercle et fermer le couvercle.
- 

Le cas échéant, éliminer tout liquide avant de mettre au rebut. Pour ce faire, couper un coin supérieur pour évacuer aisément le liquide. Après, il sera possible de mettre l'Incidin™ Wipes FlexPack au rebut.

SIEGE PRINCIPAL  
EUROPEEN :  
ECOLAB EUROPE GMBH  
Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Suisse  
+41 (0) 44-877-2001  
www.ecolab.com

Ecolab (Suisse) GmbH  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41 (0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch



www.ecolabhealthcare.ch/f



**ECOLAB**®

HC 2046 Mise à jour 04/2024