



DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOLS ET SURFACES

SURFANIOS Premium

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOLS ET SURFACES

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation
Application biocide: pour les surfaces générales.

- Double action : combinaison de détergent et de désinfectant action dans une opération simultanée
- Large spectre d'efficacité dans des temps de contact courts
- Agent chélateur facilement biodégradable



SURFANIOS Premium

Détergent Désinfectant Sols et Surfaces



Surfanios Premium
5 L Bidon

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 10.9
- pH du produit dilué (0,25%) : environ 8,5
- Densité à 20°C : 1,009 g/ml
- Refraction index: 1.3587

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ	RATIO DE MÉLANGE	TEMPS D'ACTION
Bactéricide - selon : EN 13727* (5 min 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Levuricide - selon : EN 13624* (15 min, 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Tuberculocide - selon EN 14348*	0,50 %	30 min
Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*	0,25 %	5 min
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	2,0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1,0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1,0 % / 2,0 %	60 min / 30 min

* conditions de saleté

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	CONDITIONNEMENT (UNITÉ)	NUMÉRO D'ARTICLE
SURFANIOS Premium	4 x 5 L Bidon	3101190

DOMAINE D'APPLICATION

Détergent Désinfectant Sols et Surfaces. Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation Application biocide: pour les surfaces générales.

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée.

Diluer le concentré avec de l'eau jusqu'à la concentration souhaitée.

Pour diluer par exemple à une concentration de 0,25% (2,5 ml / l), ajouter 20 ml pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. + 60 ° C).

Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²).

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Pour les dispositifs médicaux : rincer abondamment à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit.

Pour les applications biocides: Le rinçage est inutile sauf pour les zones à traiter en contact avec la peau.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

INGRÉDIENTS

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), tensioactifs non ioniques, agents séquestrants, parfum, colorant et excipients.

CERTIFICATS

Dispositif médical et biocide. L'activité antimicrobienne complète de SURFANIOS Premium est incluse dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

STOCKAGE

Stockage : entre +5°C et +25°C.

VEILLEZ A LA PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX

L'étude de l'étiquette et des informations sur le produit est obligatoire avant toute utilisation.



PRODUIT RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL.



CE
0459
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

ECOLAB®

www.ecolab.com