



SOLUTION D'AIDE AU RINÇAGE DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Anios RHW

UNE SOLUTION NEUTRE DE RINÇAGE DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET MÉDICAUX

Un produit combiné qui assure un séchage rapide sans trace.

- Activateur de séchage
- Utilisable avec toute qualité d'eau
- Haute compatibilité avec les polysulfones



Anios RHW

Une solution neutre de rinçage des instruments chirurgicaux et médicaux



Anios RHW
Bidon de 5 L
Référence: 3103210

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide limpide incolore
- pH du produit pur* à 20°C: min 2 - max. 3
- pH du produit dilué à 0,03%*: environ 4,2
- pH du produit dilué à 0,3%*: environ 3,6
- Densité à 20°C: 1,03
- Conductivité du produit dilué à 0,03% - 0,2%: 53 - 228 $\mu\text{S}/\text{cm}$

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT UNITAIRE	RÉFÉRENCE
Anios RHW	2 bidons de 5 L	3103210

INDICATIONS

Produit de rinçage pour instruments chirurgicaux et médicaux. Activateur de séchage particulièrement recommandé pour une utilisation dans des machines alimentées en eau non purifiée par osmose inverse.

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. Utilisation aux dilutions automatiques de 0,03 à 0,3% (soit 0,3 à 3 ml) en eau froide ou chaude selon le type de machine. Compatible avec les cycles de désinfection thermique.

COMPOSITION

Tensioactifs non ioniques et anionique, acide lactique, Isopropanol, excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Disponibles sur demande.


POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



 **LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
ECOLAB (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

ECOLAB[®]

www.ecolab.com