



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION THERMOCHIMIQUES POUR LE RETRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INSTRUMENTS

Sekumatic™ NDT

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION D'INSTRUMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX ET DE DISPOSITIFS MÉDICAUX. PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES LAVEURS, LES TUNNELS DE LAVAGE, LES APPAREILS DE DÉSINFECTION ET LES CABINES DE LAVAGE

- Excellente compatibilité matérielle : compatible avec une large gamme d'instruments chirurgicaux
- Utilisation multiple : fonctionne comme nettoyant et désinfectant. Conçu pour être utilisé sur tout type de laveur, tunnel de lavage ou cabine de lavage



Sekumatic™ NDT

Nettoyage et désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux et de dispositifs médicaux. Peut être utilisé dans les laveurs, les tunnels de lavage, les appareils de désinfection et les cabines de lavage



Sekumatic NDT
Bidon de 5 L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Liquide transparent incolore
- Densité à 20 °C : env. 1,0
- pH du produit pur à 20 °C : 2,0
- pH du produit dilué :
 - 0,1 % dans l'eau courante : 4,3
 - 0,5 % dans l'eau courante : 3,8
 - 1 % dans l'eau courante : 3,5
 - 2 % dans l'eau courante : 3,2
- Conductivité (solution) :
 - 0,1% = 35 µs/cm
 - 0,5% = 105 µs/cm
 - 1% = 210 µs/cm
 - 2% = 390 µs/cm
- Valeurs de viscosité : < 10 mPa/s

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ALLÉGATION/CONDITIONS	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide* - Selon la norme EN 13727/EN 14561	0.5%	5 min	55°C
Levuricide* - Selon la norme EN 13624/EN 14562	0.1%	5 min	55°C
Fongicide* - Selon la norme EN 13624/EN 14562	1.0%	10 min	55°C
Mycobactéricide* - Selon la norme EN 14348/EN 14563	2.0%	10 min	60°C
Efficace contre les virus enveloppés* - Selon la norme EN 14476/EN 17111	1.0%	15 min	20°C

*=conditions de saleté

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE ET LA COMMANDE

PRODUIT	UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	CODE DE COMMANDE
Sekumatic NDT	2 bidons de 5 L	3111390

ZONE D'APPLICATION

Liquide pour le nettoyage et la désinfection thermochimiques d'instruments médicaux et chirurgicaux avant stérilisation et de dispositifs médicaux tels que les cadres de lit, les chariots, les récipients, les tables de chevet et les tables de salle d'opération dans tous les laveurs courants pour tous les éléments lavables en machine.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Solution concentrée. À utiliser pour le retraitement automatisé de dispositifs médicaux dans les laveurs-désinfecteurs, les tunnels de lavage et les cabines de lavage. À utiliser dilué entre 0,5 % et 2,0 %, de préférence dans l'eau tiède à chaude, selon le type de machine. Respecter les concentrations et le temps de contact requis. Cycle de rinçage avec eau du robinet requis. S'assurer de la compatibilité matérielle avant utilisation.

INGRÉDIENTS

N, N-didécyl-N, N-chlorure de diméthylammonium, tensioactif non ionique, agent séquestrant, agent antimoussant.

STOCKAGE

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (définies conformément aux règles européennes en vigueur relatives à la classification et à l'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5 °C et +25 °C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'activité antimicrobienne complète de Sekumatic NDT figure dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

DISPOSITIF MÉDICAL : À UTILISER AVEC PRÉCAUTION

Veuillez lire l'étiquette et les informations sur le produit.



USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

CH REP



ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

ECOLAB EUROPE GMBH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz

CE
0297



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®

www.ecolab.com