

Sekusept™ MultiEnzyme



Pré-nettoyage enzymatique de dispositifs médicaux incluant des endoscopes flexibles

Le nettoyage des endoscopes et des instruments médicaux est un prérequis pour une désinfection efficace.

Sélectionnée avec soin, la combinaison d'enzymes, de tensioactifs et d'autres ingrédients de Sekusept MultiEnzyme vous offre d'excellentes performances de nettoyage pour tous types d'instruments médicaux, dont les endoscopes flexibles.

Sekusept MultiEnzyme est également synonyme de:

- Compatibilité avec les matériaux grâce à son pH neutre
- Gain de temps, puisqu'il évite le re-nettoyage
- Rentabilité, de par sa faible concentration d'utilisation



Sekusept™ MultiEnzyme

Pré-nettoyage enzymatique de dispositifs médicaux incluant des endoscopes flexibles



Sekusept MultiEnzyme
Flacon de 2 L



Sekusept MultiEnzyme
Bidon de 6 litre

Rapide

Sekusept MultiEnzyme assure un nettoyage approfondi et efficace. Il vous aide ainsi à réduire le temps consacré au nettoyage, tout en évitant le re-nettoyage.

Simple

Sekusept MultiEnzyme s'appuie sur un mélange unique de tensioactifs et d'enzymes (protéase, lipase et amylase) pour aider à décomposer les protéines, les graisses et l'amidon. Sa formule permet un rinçage facile et une bonne visibilité des instruments. Grâce à sa couleur bleue transparente, il est possible de déterminer si le produit a été ajouté.

Économique

Sekusept MultiEnzyme peut être utilisé à de faibles concentrations de l'ordre de 0,3 % (3 mL/Litre) à 2 % (20 mL/Litre) pendant 10 minutes, ce qui vous permet de réduire votre consommation de produit par cycle.

Informations

Produit	Conditionnement	Référence
Sekusept MultiEnzyme Flacon doseur avec bouchon doseur	4 x 2 L	3046620
Sekusept MultiEnzyme - Bidon	1 x 6 L	3046640

Indications

Détergent enzymatique destiné à tous types d'instruments médicaux, dont les endoscopes flexibles. Convient également à une utilisation dans les bains à ultrasons.

Mode d'emploi

Selon le type et le degré de salissure, préparez une solution de 0,3 % - 2 % (3 - 20 mL/L) pendant 10 minutes au minimum, avec une eau de qualité au moins potable. Plongez-y l'article à nettoyer, en veillant à ce que toutes les surfaces soient complètement mouillées. Nettoyez les instruments conformément aux instructions du fabricant du dispositif, notamment concernant l'action mécanique appropriée (brossage, par exemple). En cas d'utilisation dans un bain à ultrasons (temps de contact de 5 minutes au minimum), veillez à ce qu'ils restent couverts pendant la sonification.

Rincez avec une eau de qualité au moins potable. Pour le retraitement manuel des endoscopes, séchez les surfaces externes et les canaux pour éviter la dilution de la solution désinfectante utilisée lors de l'étape suivante. Pour la désinfection terminale, procédez au retraitement en conséquence. Portez une protection faciale et des gants appropriés pendant toute la durée du processus.

Composition

Tensioactif non ionique, agent anti-corrosion, solvants, complexe enzymatique, conservateur, excipients.

Conditions de stockage

Dangereux : respectez les précautions d'emploi (définies conformément aux règles européennes en vigueur relatives à la classification et à l'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

Disponibles sur demande.

Pour une utilisation en toute sécurité des dispositifs médicaux

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

CH REP

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz



ECOLAB EUROPE GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™