

DÉTERGENT POUR LE RETRAITEMENT AUTOMATISÉ DES ENDOSCOPES

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**DÉTERGENT POUR ENDOSCOPES FLEXIBLES.
À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC
SOLUSCOPE SERIE 5 ET SERIE XS**

- Détergent mono-enzymatique
- Efficacité prouvée contre le biofilm et les protéines
- Conforme à la norme EN ISO 15883-4
- Compatible avec une large gamme d'endoscopes flexibles
- Système de bouchon sécurisé et canule intégrée au bidon



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Détergent pour endoscopes flexibles. A utiliser exclusivement avec Soluscope Serie 5 et Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

COMPOSITION DU PRODUIT

- Surfactants non ioniques
- Agents séquestrants
- Protéase
- Excipients

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Liquide jaune clair à ambré
- Densité à 20°C : 1,1 g/mL
- pH produit pur à 20°C : environ 10,1*
- pH dilué à 0,5 % : environ 7,5*
- Conductivité à 0,5 % : 552 µS/cm

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

INFORMATIONS PRODUIT

PRODUIT	UNITÉ D'EMBALLAGE	CODE DE COMMANDE
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

MODE D'EMPLOI

- Visser le bouchon blanc relié à votre LD Soluscope sur le bidon (voir le manuel d'utilisation du LD)
- Durée de conservation après ouverture : 2 mois lorsqu'il est raccordé au laveur-désinfecteur (inscrire la date d'ouverture sur l'étiquette à l'endroit prévu à cet effet)
- Assurez-vous que l'orifice d'aération n'est pas obstrué
- Dilution automatique

CONDITIONS DE STOCKAGE

ATTENTION - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Dispositif Médical de Classe I.
Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France



ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz



ECOLAB EUROPE GMBH
Hofwiesenstrasse 349
ch-8050 Zurich
Schweiz



www.ecolab.com



www.soluscope.com