

Soluscope™ PAA



Désinfectant pour le retraitement automatisé des endoscopes

Désinfectant pour endoscopes flexibles à utiliser exclusivement dans les laveurs-désinfecteurs Soluscope Serie 4 PA, Serie XS et Serie 5

- Désinfectant à base d'acide peracétique
- Activité antimicrobienne à large spectre
- Conforme à la norme EN ISO 15883-4
- Compatible avec une large gamme d'endoscopes flexibles
- Bouchon avec système de verrouillage et canule intégrée au bidon



Soluscope™ PAA

Désinfectant pour endoscopes flexibles à utiliser exclusivement dans les laveurs-désinfecteurs Soluscope Serie 4 PA, Serie XS et Serie 5



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Composition du produit

- 5% (w/w) Acide peracétique
- Agents stabilisants

Caractéristiques du produit

- Durée de conservation : 24 mois non ouvert
- Aspect : clair et incolore
- Odeur : caractéristique
- pH du produit pur : 1 - 12*
- Poids spécifique à 20°C : 1,10 - 1,13
- Indice de réfraction : 1,35 - 1,37
- Viscosité : < 10 mPa/s

*Mesures de la valeur du pH dans des conditions d'utilisation au moyen d'un pH-mètre avec compensation de la température.

Propriétés microbiologiques

Recommandations/conditions	Concentration	Temps de contact	Température
Soluscope Serie 4 PA (WD) et Soluscope Serie 5 (WD)			
Bactéricide* (EN 13727, EN 14561), Mycobactéricide* (EN 14348, EN 14563), Fongicide* (EN 13624, EN 14562) & Virucide* (EN 14476, EN 17111)	1,8%	3 mins	40°C
Soluscope Serie XS (WD)			
Bactéricide* (EN 13727, EN 14561), Mycobactéricide* (EN 14348, EN 14563), Fongicide* (EN 13624, EN 14562) & Virucide* (EN 14476, EN 17111)	1,0%	6 mins	40°C

Se référer au manuel du laveur désinfecteur pour les conditions d'utilisation

*=conditions de propreté

Assortiment

Produit	Unité d'emballage	Code produit
Soluscope PAA	2 x 5 L	3101230

SOLUSCOPE SAS
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

0297

Distribué par :

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
Switzerland

www.ecolab.com

Mode d'emploi

Solution concentrée

- Visser le bouchon à piston rouge sur le bidon. Veiller à ce que l'orifice d'aération ne soit pas obstrué
- Mettre le bidon en place et le connecter au laveur-désinfecteur (voir le manuel d'utilisation du LD)
- Dilution automatique par le LD

Durée de conservation après ouverture :
2 mois en cas de raccordement au laveur-désinfecteur (inscrire la date d'ouverture sur l'étiquette à l'endroit prévu à cet effet).

Stockage

Attention - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stocker entre +5°C et +25°C.

Utiliser les dispositifs médicaux en toute sécurité

Classe IIb

Veuillez lire l'étiquette et les informations présentes sur le produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™