

Soluscope P



Désinfectant pour le retraitement automatisé des endoscopes

Désinfectant pour endoscopes flexibles

- Désinfectant à base d'acide peracétique
- Activité antimicrobienne à large spectre
- Conforme à la norme EN ISO 15883-4
- Compatible avec une large gamme d'endoscopes flexibles
- Connexion sans faille



Soluscope P

A utiliser exclusivement dans les laveurs- désinfecteurs Soluscope Serie 3 PA, Sprint, Sprint PT, Serie ENT & Serie TEE en combinaison avec l'additif Soluscope A



Soluscope
Serie 3 PA



Soluscope
Sprint



Soluscope
Sprint PT



Soluscope
Serie ENT



Soluscope
Serie TEE

Composition du produit

- 5% (p/p) Acide peracétique
- Agents stabilisants

Caractéristiques du produit

- Durée de conservation : 14 mois avant ouverture
- Aspect : solution claire et incolore
- Odeur : caractéristique
- pH produit pur* : 1 - 4,2
- Poids spécifique à 20°C : 1,10 - 1,13
- Indice de réfraction : 1,35 - 1,37
- Viscosité : < 10 mPa/s

* pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température


Propriétés microbiologiques

Activité/Conditions	Temps de contact	Température
Bactéricide* - Selon EN 13727, EN 14561 en combinaison avec l'additif Soluscope A dans WD	40°C	5 min
Mycobactéricide* - Selon EN 14348, EN 14563 en combinaison avec l'additif Soluscope A dans WD	40°C	5 min
Fongicide* - Selon EN 13624, EN 14562 en combinaison avec l'additif Soluscope A dans WD	40°C	5 min
Virucide* - Selon EN 14476, EN 17111 en combinaison avec l'additif Soluscope A dans WD	40°C	5 min

*=conditions de propreté

Informations

Produit	Conditionnement	Référence
Soluscope P	2 bidons de 5 L	3100970

 **SOLUSCOPE SAS**
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France
1434

Distribué par :
ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
Switzerland
www.ecolab.com

Mode d'emploi

- Solution concentrée
- Visser le plongeur équipé du bouchon rouge sur le bidon. S'assurer que l'évent n'est pas bouché
- Mettre le bidon en place et le connecter au Laveur Désinfecteur (reportez-vous au manuel d'utilisation du Laveur Désinfecteur)
- Dilution automatique

A utiliser dans les 2 mois après la date de connexion à la machine (inscrire la date d'ouverture sur l'étiquetage dans l'emplacement prévu à cet effet).

Conditions de stockage

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi (élaboré selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

Pour une utilisation en toute sécurité des dispositifs médicaux

Dispositif médical de classe IIb
Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™