

HYGIENISCH, FUNKTIONSSICHER, WIRTSCHAFTLICH

Dermados™ manual

Zur sicheren Applikation von Händedesinfektionsmitteln,
Wasch- und Pflegelotionen sowie Reinigungsschaum

Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln und anderen Präparaten in hygienerelevanten Bereichen steht die wirtschaftliche, einfache und sichere Applikation im Vordergrund.




- Universell einsetzbar
- Tropffrei
- Langlebig
- Wartungsarm
- Anwenderfreundlich



Dermados™ manual

Funktionssicher. Wirtschaftlich.

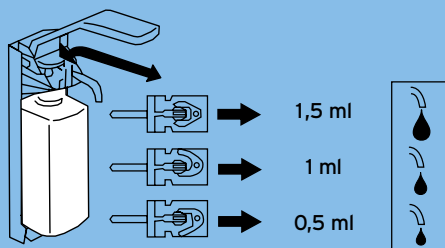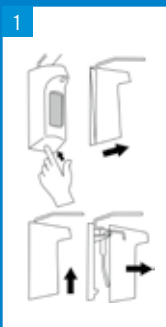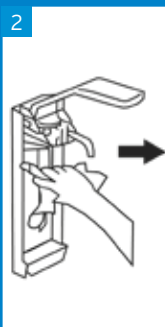

Unsere Leistung	Ihr Nutzen			
Hygienische Entnahme aller Händehygieneprodukte	Sichere Applikation in allen Bereichen			
Einfache Montage mit und ohne Bohren	Montage auf allen Materialien; Maximale Flexibilität bei der Spendermontage			
Verstellbare Dosiermenge bei Flüssigpumpen (von 0,5-1,5 ml pro Hub)	Für Dermados™ S 			
Für alle marktüblichen Flaschen geeignet, nicht nachtropfend	Universell einsetzbar			
Leicht zu reinigen und zu desinfizieren	Wischdesinfizierbar mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Maschinell im RDG aufbereitbar bis 70 °C (spülmaschinenfest)			
Aus leicht zu pflegendem, kratz- und schlagfestem Kunststoff	Unempfindliche Materialien auch bei starker Beanspruchung			
Austauschbare Pumpe 	Durch einfaches Austauschen der Pumpe wird aus dem Wandspender für Flüssigprodukte ein Schaumspender			
Pumpenwechsel in 20 Sekunden	Zeit- und kostensparende, dezentrale Aufbereitung. Austauschen statt aufbereiten			
1 	2 	3 	4 	5 

TECHNISCHE DATEN

WERKSTOFF

- ▲ Gehäuse: ABS
- ▲ Wandhalter: POM
- ▲ Kolbenpumpe: Kunststoff

BESTÄNDIGKEIT

Korrosionsbeständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

MASSANGABEN

Gehäuseabmessungen
mit Armhebel Dermados™ S:
ca. 89 mm x 197 mm x 285 mm

GEWICHT

Wandspender für 500 ml: ca. 600 g

ZUBEHÖR

Tropfschale für Dermados™ S;
Platzbedarf für Wandspender mit
Tropfschale H = 375 mm,
Gewicht der Tropfschale: ca. 200 g

VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN

Erfüllt die Anforderungen der


- ▲ BGR 250/TRBA 250 biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege
- ▲ Richtlinie „Händehygiene“ des RKI

Dermados™ manual


Montage- und Bestellinformationen



1

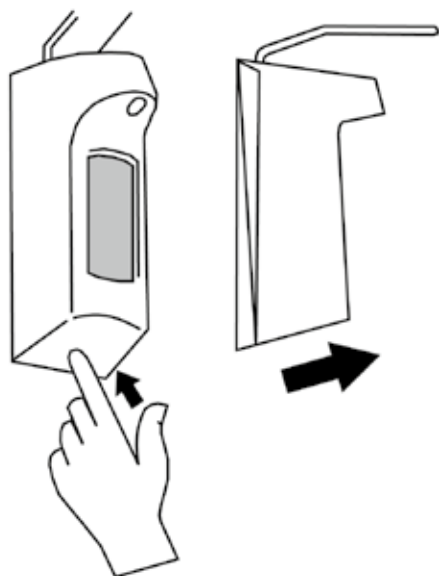

2

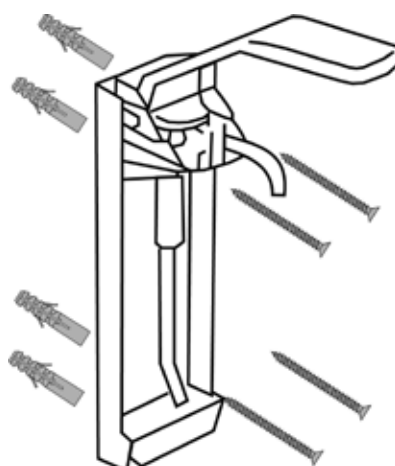

MONTAGE

Die Montage erfolgt durch Anbohren an eine geeignete Stelle der Wand mittels Bohrmaschine. Für die Montage werden Schraubenzieher oder Akkuschauber benötigt. Die erforderlichen Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Bei bereits existierenden Bohrlöchern kann die Adapterplatte verwendet werden und es ist kein erneutes Bohren erforderlich. Alternativ können Sie den Dermados™ Wandspender jetzt auch ohne Bohren befestigen.

BESTELLINFORMATIONEN


Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Dermados™ S	1 Stück für 500 ml	100 000 04

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE


Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Dermados™ S Befestigungsset (ohne Bohren)	10 Stück	100 372 91
Austauschpumpe Dermados™ S	50 Stück	100 001 69
Schaumpumpe Dermados™ S	10 Stück	100 128 42

3

Dermados™ S

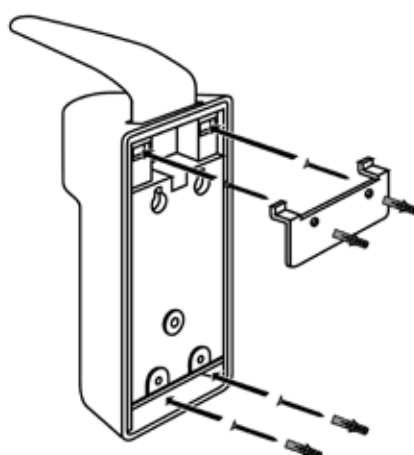

Verwendung der Adapterplatte

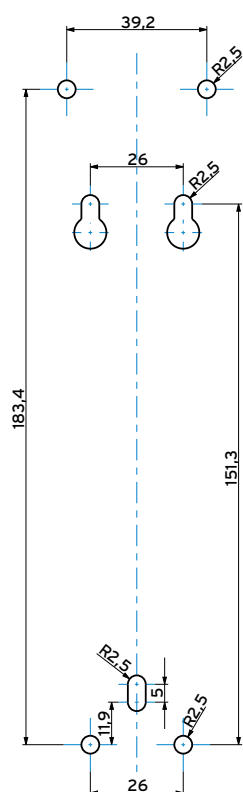

Dermados™ S Tropfschale

Zubehör für Wandspender Dermados™ zur sicheren Applikation






Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Schutz der Umgebung vor Vertropfen von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegeelotionen	Sichere Applikation in allen Bereichen, keine Rutschgefahr für Personal, Patienten und Besucher
Einfache und blitzschnelle Montage ohne Bohren	Spart Zeit. Das Nachrüsten bereits montierter Dermados™ S Spender ist jederzeit problemlos möglich
Leicht zu reinigen und desinfizieren	Wischdesinfizierbar mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Aus leicht zu pflegendem, kratz- und schlagfestem Kunststoff	Wischdesinfizierbar mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Einheitliches Erscheinungsbild mit dem Dermados™ S Wandspender	Formschöne Gesamtlösung

MONTAGEANLEITUNG

Die Montage erfolgt durch einfaches Einhängen der Tropfschale in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der Rückplatte des Dermados™ Wandspenders.

Es sind keine zusätzlichen Bohrlöcher notwendig.

Dazu wird lediglich die Haube (wie beim Flaschenwechsel) abgenommen, die Tropfschale eingehängt und die Haube wieder aufgesteckt.

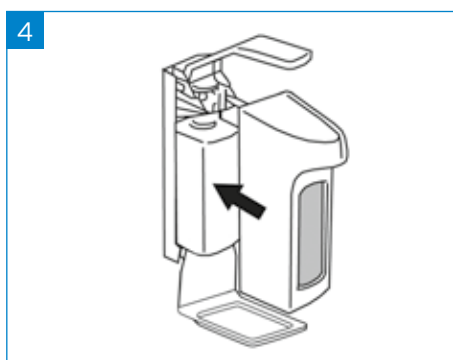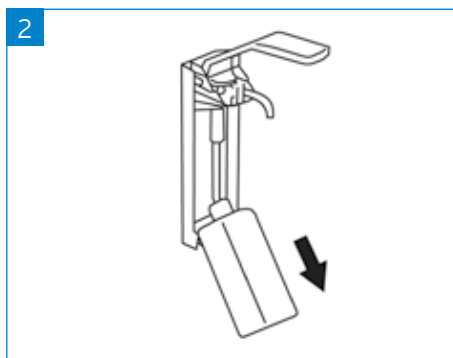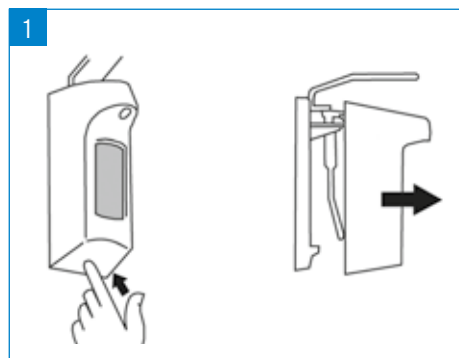

TECHNISCHE DATEN

WERKSTOFF

Widerstandsfähiger ABS Kunststoff

BESTÄNDIGKEIT

Korrosionsbeständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

MASSANGABEN

Ca. 130 mm x 180 mm x 190 mm
(B x T x H), Platzbedarf für den
Wandspender mit Tropfschale
H = 375 mm

GEWICHT

Ca. 200 g

AUSSEHEN

Angepasst an Design und Farbe
des Dermados™ Wandspenders

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Tropfschale Dermados™	10 Stück	100 998 26