

KLARSPÜLER FÜR CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Anios RHW

EIN NEUTRALER KLARSPÜLER FÜR CHIRURGISCHE UND MEDIZINISCHE INSTRUMENTE

Ein kombiniertes Produkt, das eine schnelle und rückstandslose Trocknung gewährleistet.

- Trocknungsaktivator
- Einsetzbar bei allen Wasserqualitäten
- Gute Materialverträglichkeit, auch bei Polysulfonen



Anios RHW

Ein neutraler Klarspüler für chirurgische und medizinische Instrumente



Anios RHW
5 L Kanister

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farblose klare Flüssigkeit
- pH Wert unverdünntes Produkt bei 20°C: min 2 - max. 3
- pH Wert verdünntes Produkt von 0,03%*: um 4,2
- pH Wert verdünntes Produkt von 0,3%*: um 3,6
- Dichte bei 20°C: 1,03 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,03% - 0,2%: 53 - 228 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels eines pH-Meters mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios RHW	2 x 5 L Kanister	3103210



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

ANWENDUNGSBEREICH

Klarspüler für chirurgische und medizinische Instrumente. Trocknungsaktivator, besonders empfohlen für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, die mit Wasser gespeist werden, das nicht durch Umkehrosmose gereinigt wurde.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung für den professionellen Einsatz. Die Dosierung erfolgt über die maschineneigenen Dosierpumpen. Dosiermenge im Reinigungs- und Desinfektionsgeräten 0,03 bis 0,3% (0,3 - 3 ml / Liter) je nach Gerätetyp in kaltem oder heißem Wasser. Kompatibel mit thermischen Desinfektionszyklen.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und anionische Tenside, Milchsäure, Isopropanol und Trägerstoffe.

LAGERUNG

Beachten Sie die Benutzungsanleitung (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften für die Klassifikation und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Etikette und die Produktinformation.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



www.ecolab.com