

Soluscope P



Desinfektionsmittel für die Automatisierte endoskop aufbereitung

Desinfektionsmittel für flexible endoskope

- Desinfektionsmittel auf Peressigsäurebasis
- Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum
- Entspricht der Norm EN ISO 15883-4
- Kompatibel mit einer breiten Palette flexibler Endoskope
- "Foolproof"-Verbindung



Soluscope P

Zur ausschließlichen Verwendung mit dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät Soluscope Serie 3 PA, Sprint, Sprint PT, Serie ENT & Serie TEE in Kombination mit Soluscope A Additive



Soluscope
Serie 3 PA



Soluscope
Sprint



Soluscope
Sprint PT



Soluscope
Serie ENT



Soluscope
Serie TEE

Produktzusammensetzung

- 5% (w/w) Peressigsäure
- Stabilisatoren

Produktmerkmale

- Lagerfähigkeit: 14 Monate wenn geschlossen
- Aussehen: Klar und farblos
- Geruch: charakteristisch
- pH Konzentrat*: 1 - 4,2
- Spezifische Dichte bei 20°C: 1,10 - 1,13
- Brechungsindex: 1,35 - 1,37
- Viskosität: < 10 mPa/s

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.


Mikrobiologische eigenschaften

Wirksamkeit	Kontaktzeit	Temperatur
Bakterizid* - Gemäß EN 13727, EN 14561 in Kombination mit Soluscope A Additiv im RDG-E	5 Minuten	40°C
Mykobakterizid* - Gemäß EN 14348, EN 14563 in Kombination mit Soluscope A Additiv im RDG-E	5 Minuten	40°C
Fungizid* - Gemäß EN 13624, EN 14562 in Kombination mit Soluscope A Additiv im RDG-E	5 Minuten	40°C
Viruzid* - Gemäß EN 14476, EN 17111 in Kombination mit Soluscope A Additiv im RDG-E	5 Minuten	40°C

*=niedrige Belastung

Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Soluscope P	2 x 5 L	3100970

 **SOLUSCOPE SAS**
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France
1434

Vetrieb durch:
ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
Switzerland
www.ecolab.com

Gebrauchsanweisung

- Konzentrierte Lösung
- Schrauben Sie den mit der roten Kappe ausgestatteten Kolben auf die Flasche. Sicherstellen, dass die Luftöffnung nicht verstopft ist.
- Setzen Sie den Behälter ein und schließen Sie ihn an den Reinigungs- und Desinfektionsgerät an (siehe Benutzerhandbuch für den Reinigungs- und Desinfektionsgerät)
- Automatische Verdünnung

Innerhalb von 2 Monaten nach dem Anschluss an das Gerät verbrauchen (Öffnungsdatum an der hierzu vorgesehenen Stelle auf dem Etikett vermerken).

Lagerung

Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei jeder Nutzung (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten).

Medizinprodukt vorsicht bei der anwendung

Klasse IIb.

Bitte Etikett und Produktinformation lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]