

SERIE 4

schnell, kompakt, effizient



Soluscope

SERIE 4



Intuitive Technologie



Steuerung mit Fingerspitzengefühl

MODERNER TOUCHSCREEN

Benutzerfreundliche Bedienung – einfach und schnell. Der neue 7-Zoll Touchscreen ist mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Zyklen und Maschinenparameter.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Das neuartige Design der Wanne kann alle Typen und Marken von flexiblen Endoskopen aufnehmen, Ultraschallmodelle eingeschlossen.

DOKUMENTATION UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

Integrierte, vollautomatische Informationsverwaltung mit Datenaufzeichnung und -sicherung.

EINFACHE ANWENDUNG

Ein breites Sortiment an verfügbaren Adaptern für alle gängigen Endoskoptypen sorgt für den universellen Einsatz in Ihrer Gesundheitseinrichtung.



Intelligentes Konzept

Innovative Kombination von Konzepten

KOMPAKT UND MOBIL ZUGLEICH


Die kompakte Größe und die einfache Installation der *Serie 4 PA* sorgt für den flexiblen Einsatz in Ihrer Einrichtung. Alle Bereiche der Maschine (Filter, Chemikalien, Drucker, Strichcode-Lesegerät) sind für den Benutzer leicht zugänglich.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Ein zweifaches Prüfsystem kontrolliert ständig alle Parameter und schlägt bei Abweichungen Alarm. Der kontinuierliche Dichtigkeitstest überprüft die Unversehrtheit des Endoskops.



– Reinigungs- und Desinfektionsgerät für flexible Endoskope

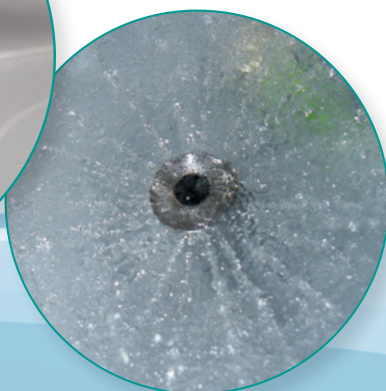

Innovativer Prozess

Das Beste der Soluscope-Technologie

EINZIGARTIGE UND PATENTIERTE DOPPELTE REINIGUNGSTECHNIK

Kombination aus Tauchbad und mechanischer Reinigung.

MODERNE PROZESSCHEMIKALIEN

Exzellente Aufbereitungsergebnisse bei geringem Verbrauch an Chemie und Wasser. Eine All-in-One-Desinfektionslösung mit nur 3 Minuten Kontaktzeit.

RESCOURCENSCHONEND

Als innovatives Produkt ist die *Serie 4 PA* der ideale Partner um Zeit, Ressourcen und Geld einzusparen. Zusätzlich ermöglicht die *Serie 4 PA* eine erhebliche Reduktion des Wasser- und Chemikalienverbrauchs und ist somit eine nachhaltige Lösung.

REPRODUZIERBARER PROZESS

Die patentierte volumetrische Kanalkontrolle überwacht jeden Kanal individuell. Damit entspricht die *Serie 4 PA* den internationalen Normen und garantiert die Sicherheit der Patienten, der Anwender und der Endoskope.



Chemie

PROZESSCHEMIKALIEN FÜR IHRE ENDOSKOPAUFBEREITUNG

Wirksame und effiziente Prozesschemikalien sorgen für eine exzellente Aufbereitung bei hervorragender Materialverträglichkeit.

ABGESTIMMTE PRODUKTE FÜR DEN AUFBEREITUNGSPROZESS

Soluscope CLN – der schaumarme Reiniger mit aktiver Wirkungskraft gegen Biofilm und Proteinanhaftungen.

Soluscope PAA – Desinfektion mit einer Kontaktzeit von nur 3 Minuten bei niedriger Dosierung und geringer Aufbereitungstemperatur zum Schutz Ihrer Endoskope.



Anschlüsse

Aufgrund von mehr als 25 Jahren Erfahrung kann *Soluscope*, eine umfassende Palette an Adaptern für die gängigsten Endoskop-Marken und Modelle anbieten. Die Adapter stellen eine sichere Verbindung zwischen Maschine und Endoskop her.



Eine Komplettlösung zu Ihren Diensten

TRANSPORTSYSTEM

Der *Soluscope Trolley* ist speziell zum Transport der Endoskope vom Aufbereitungs- zum Untersuchungsraum entwickelt worden. Die mit einem durchsichtigen Deckel ausgestattete Aufbewahrungswanne garantiert einen sicheren Transport der Endoskope. Das *Soluscope* Transportsystem – die effiziente Art Ihren Tagesablauf zu erleichtern.

LAGERUNG

Das platzsparende *Soluscope Rack* kann bis zu 10 Aufbewahrungswannen aufnehmen.

DIENTSTLEISTUNGEN

Soluscope bietet Ihnen umfassenden Service an: Wartung, Kundendienst und Schulungen.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Kapazität pro Zyklus | 1 Endoskop; Aufbereitung durch Fluten/Eintauchen |
| Dauer des Aufbereitungszyklus | 16 Minuten (Zyklus 1) |
| Aufbereitungstemperatur | 35° bis 40°C |
| Kontaktzeit / Desinfektion | 3 Minuten |
| Dokumentation | Strichcode-Lesegerät - Drucker - MemoryCard |
| Elektrischer Anschluss | 1 x 220/240 V mit Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA |
| Anschlussfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Wasserzufuhr | Leitungswasser |
| Wasserdruck | < 4 bar (58 psi) mit Druckminderer |
| Wasserdurchsatz | mindestens 4 L/min |
| Wasserhärte | 5,6 - 16,8 dH (56 - 168 mg CaO/l) |
| pH-Wert des Wassers | 6,5 bis 9 |
| Kolloidindex | < 3 |
| Umkehrosmosewasser | auf Anfrage |
| Abmessungen (B x T x H) | 63,8 x 122 x 159,2 cm (Deckel und Schublade geöffnet) 63,8 x 87,5 x 109,6 cm (Deckel und Schublade geschlossen) |
| Leergewicht | 107 Kg |
| Gewicht gefüllt | 135 Kg |

Datenverwaltung

Die *Serie 4 PA* ist kompatibel mit der umfassenden Softwarelösung *IT Soluscope*, welche Zugriff auf Ihre Endoskop Datenbank bietet und so Datenverwaltung in Echtzeit ermöglicht.



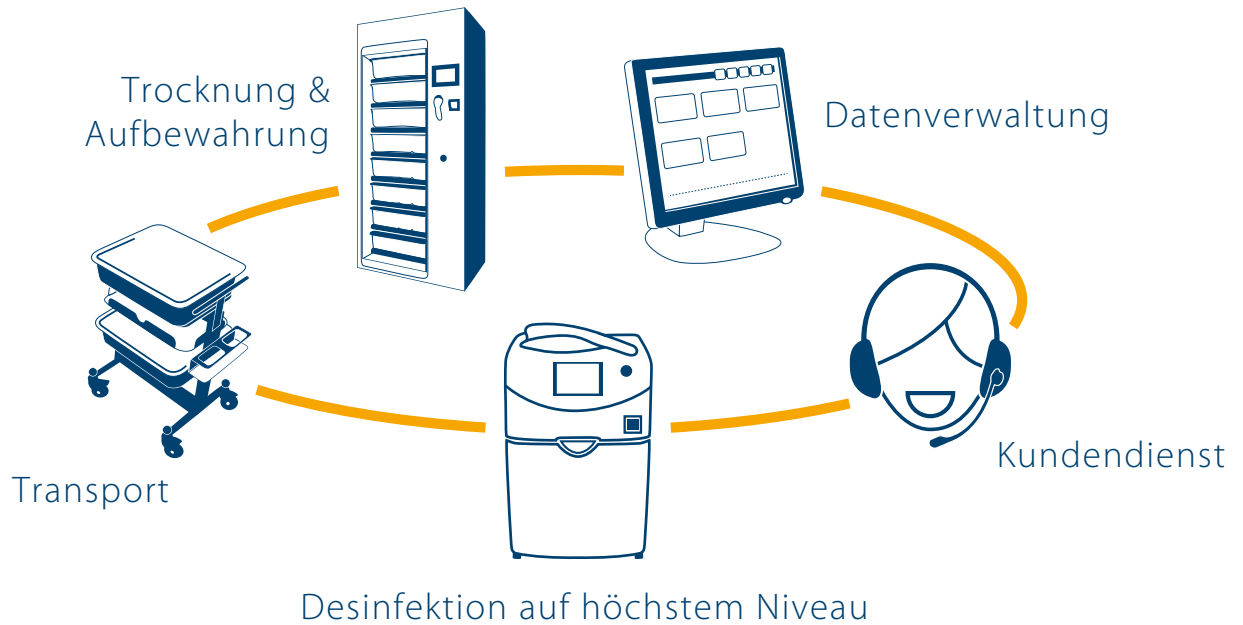

DIE SOLUSCOPE KOMPLETTLÖSUNG

Die *Soluscope* Komplettlösung bietet Produkte für den gesamten Aufbereitungsprozess von flexiblen Endoskopen an. Jedes Produkt ist einfach in der Handhabung und eine effiziente Arbeitserleichterung für Sie als Anwender.



www.soluscope.com

Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - Frankreich

☎ +33 (0)4 91 83 21 22 📠 +33 (0)4 91 83 21 10 ✉ info@soluscope.com

Soluscope GmbH: ☎ +49 (0)203 30634-60 📠 +49 (0)203 30634-64 ✉ kontakt@soluscope.com

Soluscope-Produkte erfüllen die aktuellen Auflagen der europäischen und internationalen Normen und tragen das CE-Zeichen. *Soluscope* ist nach *ISO 9001 Version 2008* und *ISO 13485 Version 2003* zertifiziert, denn die Zufriedenheit der Kunden und Patienten hat absoluten Vorrang.

Vertrieben durch



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch